

Chơn Thành, ngày 11 tháng 08 năm 2025

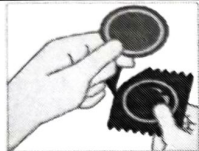
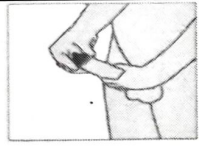
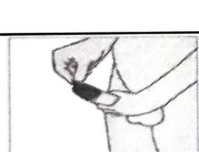
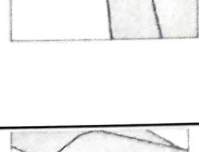
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BAO CAO SU

1. Mô tả: Bao cao su

Sản phẩm có màu trắng và sáng trong, được làm từ chất liệu mủ latex (mủ cao su) tự nhiên, có chiều dài : $\geq 17\text{cm}$, chiều rộng : 49mm - 52mm. Độ dày của sản phẩm : 0.035- 0.065 mm, thể tích áp suất nở ≥ 18 lít, áp suất nở ≥ 1 kpa. Sử dụng chất bôi trơn silicon, hàm lượng chất bôi trơn 600 ± 150 mg (độ nhớt 200-350 CS).

2. Mục đích sử dụng: Sử dụng trong phòng tránh thai và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục

3. Hướng dẫn sử dụng:

	Kiểm tra ngày hết hạn trước khi dùng Cẩn thận xé dọc theo một bên của bao gói để tránh làm hư hỏng bao cao su bằng móng tay hoặc đồ trang sức khi bạn lấy bao cao su ra khỏi bao gói.
	Đặt bao cao su lên đầu dương vật cương cứng. Nếu dương vật không cắt bao quy đầu, hãy kéo lại bao quy đầu trước khi có bất kỳ tiếp xúc nào xảy ra giữa dương vật và cơ thể đối tác, để hỗ trợ phòng ngừa nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục và có thể tránh thai.
	Bóp đầu bao cao su để đưa không khí ra ngoài. Giữ chặt bao cao su giữa ngón cái và ngón tay để trượt.
	Vuốt bao cao su phủ hết chiều dài dương vật và đảm bảo không còn không khí bên trong. Dừng lại và kiểm tra nếu bạn cảm thấy bao cao su thắt chặt quá mức trên dương vật, vì điều này có thể dẫn đến rách bao cao su. Hãy chắc chắn rằng bao cao su giữ nguyên vị trí trong quan hệ tình dục. Nếu bao cao su rơi ra thì sử dụng bao cao su mới và đeo vào trước khi tiếp tục quan hệ tình dục.
	Sau khi xuất tinh, hãy chắc chắn rằng bạn giữ đúng bao cao su trước khi bạn rút ra. Chỉ khi dương vật rút hoàn toàn, bạn mới có thể tháo bao cao su, đảm bảo giữ dương vật và bao cao su đã sử dụng cách xa âm đạo / hậu môn.
	Sau khi sử dụng, gói bao cao su trong khăn giấy và bỏ vào thùng rác.

4. Chống chỉ định, cảnh báo và thận trọng:

Bao cao su chỉ dùng một lần

Hãy sử dụng đúng loại chất bôi trơn khi cần thêm với một số loại được khuyến nghị sử dụng với bao cao su và tránh sử dụng chất bôi trơn gốc dầu, như dầu hòa, dầu em bé, sữa dưỡng thể, dầu massage, bơ, bơ thực vật, v.v., vì những thứ này có hại cho tính an toàn của bao cao su;



Tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ về khả năng tương thích của các loại thuốc bôi trơn có thể tiếp xúc với bao cao su;
Tìm kiếm sự trợ giúp y tế càng sớm càng tốt trong vòng 72 giờ, nếu rò rỉ hoặc vỡ bao cao su trong quá trình sử dụng;

Sử dụng bao cao su mới mỗi khi bạn quan hệ tình dục và làm theo hướng dẫn cẩn thận

Chú ý:



Bao cao su được làm từ mủ cao su tự nhiên, có thể gây dị ứng bao gồm sốc phản vệ nếu người dùng bị dị ứng với latex.

* Tuân thủ EN ISO 4074



Công ty Liên Doanh Medevice 3S

Khu phố 5, Chợ Thành, Bình Phước, Việt Nam

Tel: +84 271 3668711 Fax: +84 271 3669355

Email: medevice3s@gmail.com



Sản phẩm này chứa cao su tự nhiên có thể gây phản ứng dị ứng cho một số người



Không bao giờ sử dụng lại bao cao su

5. Điều kiện bảo quản:

- Điều kiện bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời

6. Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY LIÊN DOANH MEDEVICE 3S

Địa chỉ: Số 53, Quốc lộ 13, Tổ 5, Khu phố 5, Phường Chợ Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Chợ Thành, ngày 11 tháng 08 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Công Nguyên